


- 1.** Pese ja kuivaa kätesi ennen suojakalvon irrottamista. Ota suojakalvot pois visiirin molemmilta puolilta.



- 2.** Napsauta visiiri kiinni sankaan reikien kohdalta kaikista neljästä kohtaa. Ensin toinen puoli.

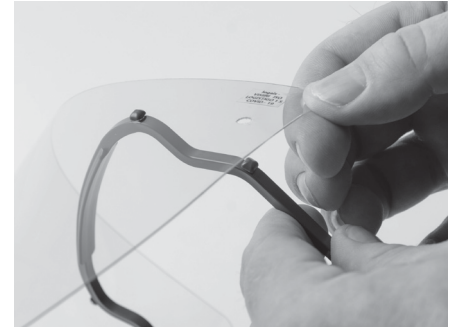

- 3.** Ja sitten toinen puoli.



- 4.** Sankojen istuvuutta voidaan parantaa niiden päitä taivuttamalla. Muotoile sankoja yksitellen taivuttamalla niitä sisäänpäin. Lämmitys esim. kuumalla vedellä helpottaa taivutusta. Sanka kestää myös taivutuksen huoneenlämpöisenä.



- 5.** Halutessasi voit käyttää erillistä sankaremmiä sujauttamalla sen sankojen päiden päälle. Leikkaa sankaremmi lyhyemmäksi, jos se on liian pitkä.



- 6.** Käyttövalmis suojavaisiiri

DROP-LESS FACESHIELD -SUOJAVISIIRI

Käyttökohde: Käyttäjän henkilökohtaiseen kasvojen ja silmien suojaukseen teollisuudessa, terveydenhuollossa, laboratorioissa, Koulutus- ja yksityiskäytössä sekä muissa samankaltaisissa käyttökohteissa. Visiiri suojaa käyttäjää erilaisilta ilmassa liikkuvilta partikkeleilta, roiskeilta, nestepisaroilta, mukaan lukien haitallisilta biologisilta tekijöiltä (bakteerit, virukset).
Visiiri ei suojaa nopeasti lentäviltä kiinteiltä kappaleilta.



Sisältö

Sanka (PA, nylon), visiiri (polykarbonaatti), sankaremmi (TPE, termoplastinen elastomeeri).



EN 166:2001

Käyttöohjeet

VAROITUS: MAHDOLLISEN ELEKTROSTAATTISEN VARAUKSEN TAKIA VISIIRIN KÄYTTÖ RÄJÄHDYSHERKKIEN TILOJEN TAI HELPOSTI SYTTYVIEN AINEIDEN LÄHEISYYDESSÄ KIELLETTY.

Ennen pakkauksen avausta: pese ja kuivaa kätesi ja avaa pakkaus ainoastaan turvallisessa ympäristössä.

Valmistuskuukausi/-vuosi on merkitty sankaan. Tuotteen käyttöikä on 2 vuotta valmistuksesta. Älä käytä vanhentunutta tuotetta.

Tarkista ennen käyttöä, että tuotteen osat ovat ehjiä. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.

Katso kokoamisohjeet ennen käyttöä (Katso kuvat 1...6)

Visiirissä on suojakalvot, jotka tulee poistaa ennen tuotteen kokoamista. Yhdistä sangan tapit visiirissä oleviin reikiin yksitellen. Visiiri napsahtaa, kun tapit asettuvat oikein paikalleen. Varmista vielä tappien kiinnitys visiiriin silmämääräisesti sekä kevyesti vetämällä. Sangan päitä voi kevyesti taivuttaa paremman istuvuuden takaamiseksi. Sankaremmiä voi käyttää pysyvyyden varmistamiseksi, sankaremmiä voi tarvittaessa leikata lyhyemmäksi saksilla tai veitsellä.

Säilytys

Suojaa tuote suoralta auringonvalolta. Tuote voidaan säilyttää normaalissa huoneenlämmössä.

Puhdistus ja kierrätys

Tuote voidaan puhdistaa pehmeällä materiaalilla käyttäen polykarbonaatille soveltuvia pintapuhdistusaineita. Uudelleen käyttöä ei ole rajoitettu. Käyttäjän tulee arvioida itse visiirin optista laatua ja vaihtaa visiiri uuteen, mikäli sen kunto on huonontunut käytön seurauksena. Puhdistuksen jälkeen kaikki materiaalit ovat kierrätettävissä muovina.

Tyyppihyväksyntä ja jatkuva vaatimustenmukaisuuden valvonta: SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P. Vaatimustenmukaisuusvakuutus osoitteessa www.logistigo.fi

SUOMEN LOGISTIGO OY

Haapaniementie 1 | FI-40800 Vaajakoski | Finland | logistigo.fi

logistigo

POS LOGISTICS & PRODUCTION